

KRZESŁO EWAKUACYJNE GLOBEX GEC5

1. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Dla pełnego bezpieczeństwa zaleca się, aby krzesło ewakuacyjne obsługiwało dwóch operatorów. Krzesło należy sprawdzać przed i po każdym użyciu, aby upewnić się, że jest sprawne.

Aby uzyskać dostęp do niniejszej instrukcji, która jest załączona z tyłu siedziska, należy ustawić krzesło w pozycji pionowej.

Zwolnij pas bezpieczeństwa, całkowicie rozłóż siedzisko, pociągnij rączkę do góry, aż automatycznie się zablokuje, następnie wyreguluj zagłówki.

Aby umieścić użytkownika:

Gdy krzesło zostało rozłożone, a koła teleskopowe złożone, utrzymuj je w pozycji pionowej, przechyl krzesło do przodu na poziomy drążek.

Trzymaj stabilnie krzesło – pozwoli to, by użytkownik bezpiecznie usiadł i zapiął pas bezpieczeństwa.

Maksymalne obciążenie:
150 kg.



2. ZEJŚCIE PO SCHODACH



Gdy użytkownik znajduje się na siedzisku z zapiętym pasem bezpieczeństwa, lekko odchyl krzesło do tyłu, aż poziomy drążek podniesie się z podłoża, następnie zbliż się do schodów.

Gdy mamy pewność, że krzesło jest odpowiednio ustawione, zjeżdż w dół, tak aby prowadnice spoczywały na dwóch noskach schodowych.

Trzymając prosto plecy z rękami na górze uchwytu delikatnie pchnij w dół w kierunku stóp i do przodu. Kontroluj zejście mocno trzymając za uchwyt, w tempie chodzenia po schodach.

Gdy znajdziesz się u dołu schodów, przechyl krzesło do przodu na poziomy drążek, następnie użytkownik może odpiąć pas bezpieczeństwa i opuścić krzesło.

NIGDY NIE PUSZCZAJ KRZESŁA PODCZAS SCHODZENIA ZE SCHODÓW.

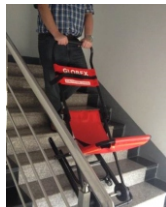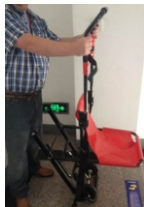

3. DO UŻYTKU JAKO WÓZEK INWALIDZKI

Przechyl krzesło do pozycji poziomej i wysuń pomocnicze koła teleskopowe, odchyl krzesło do tyłu do momentu posadowienia wszystkich czterech kół na podłożu.

Aby złożyć krzesło, należy przechylić krzesło do przodu i upewnić się, że teleskopowe koła są złożone, zwolnij dwa zaciski ochronne i opuść uchwyt, podnieś siedzisko w górę aż w pełni zostanie złożone.

Aby zabezpieczyć siedzisko zapnij pas bezpieczeństwa i zablokuj uchwyt, następnie umieść krzesło w wyznaczonym miejscu na wsporniku ściennym.



**DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE PRZEZ
PRZESZKOLONYCH OPERATORÓW**

www.krzesla-ewakuacyjne.pl